

TAIS Technical Aids
Information System

福祉用具情報システム



福祉用具詳細

[前の検索結果へ](#)
[福祉用具一覧へ戻る](#)

商品名 TANO
 製品型番 TANO2017
 TAISコード 01681 - 000005
 JISコード
 ISOコード
 分類 [1]212100:多目的ソフトウェア
 発売年月 平成30年4月
 カラー
 希望小売価格 ¥880,000

[同じ分類で検索](#)

 セット内容(モニタは含
まず)

・モーションセンサー ・制御システム(PC)

消費電力

約70W

モーションセンサー

外形寸法 : 幅 240 × 高さ 40 × 奥行 65mm

制御システム

システムをインストールした専用PC ※Officeは未搭載

付属品 : ソフトウェア、HDMI接続ケーブル、キーボード、マウス・QRコードリーダー

TANOプログラム

70種類以上の豊富なプログラムを内蔵

TANOの特徴

コントローラ等難しい操作は不要。センサーの前で体験者が動き、発声するだけでゲームの様な楽しいプログラムが展開され1人～複数人で楽しむことができる。脳トレの出題データ等、カスタマイズ編集が可能。ロボットが、画面上で各プログラムのガイドを行うため、説明不要のシステム。

トレーニング機能

運動・発声等大勢で楽しめるトレーニング

レクリエーション機能

脳トレ・魚釣りゲーム等

オリジナル編集が可能

脳トレ出題データ等(カスタマイズ編集可能)

写真撮影機能

記念撮影機能(スライドショー機能あり)

環境の条件

- ①身長 : 骨格表示プログラムでは身長100cm以上(推奨)
- ②センサー感知エリア : 0.5～8m(TANOプログラムによっては1～4m検知)
- ③センサー取り付け位置 : 付属ホルダーにてモニタ上またはモニタ前に設置

特徴

体験者の体の動きや声をセンサーが検知し、脳トレや楽しい運動に転換する自立支援システム。理学療法士の監修を受けたリハビリテーションに効果的な運動が実施可能。

使用上の注意

片足立ちや歩行練習のプログラムで転倒の危険がある方は、手すりを傍に設置したり、専属のスタッフによる見守り等、安全上の配慮が必要。
 座位で行える運動もあります。

問い合わせ先

メーカー名 [株式会社ラッキーソフト](#)
 担当部課 企画開発部 福祉担当
 住所 神奈川県平塚市宝町11-1 平塚フジビル

TEL 0463-23-7830
FAX 0463-23-7833
MAIL info@luckysoft.jp
ホームページ <http://www.luckysoft.jp/>

[前の検索結果へ](#)

[福祉用具一覧へ戻る](#)

[協会紹介](#) | [福祉用具臨床的評価事業](#) | [福祉用具プランナー情報システム](#) | [福祉用具・介護ロボット実用化支援事業](#)
[選び方使い方情報](#) | [補聴器関連](#) | [福祉用具開発者向情報](#) | [福祉用具専門ガイド](#) | [介護実習・普及センター情報](#)
[LINK集](#) | [出版案内](#) | [TOPページ](#)

Copyright 2000 Association for Technical Aids, Inc. All rights reserved.